


MEROCEL[®] HEMOX[™]

UN DISPOSITIF MÉDICAL HÉMOSTATIQUE
À BASE DE CELLULOSE OXYDÉE

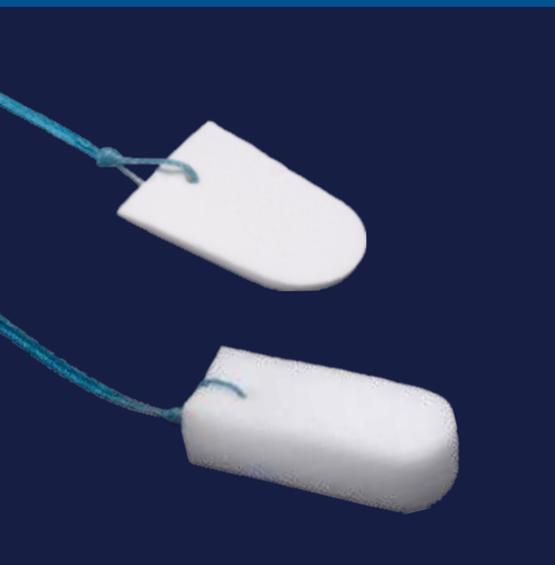

*Avancer, Ensemble

Medtronic
Further, Together*

SENTEZ TOUTE LA DIFFÉRENCE AVEC **MEROCEL®** **HEMOX™**


Merocel® hemoX™ est un tampon absorbant combinant de l'acétate de polyvinyle hydroxylé avec de la cellulose oxydée micro-dispersée. Les applications et indications sont multiples : l'éponge se décline en tampons nasaux, tampons pour épistaxis, mèches sinusales, mèches et tampons otologiques. Ces tampons et mèches peuvent être utilisés en cas d'épistaxis, de saignements postopératoires et de traumatismes. Ils se dilatent lorsqu'ils sont humidifiés favorisant ainsi le tamponnement et l'hémostase.

Merocel® HemoX™ a montré un score de douleur plus bas que les tampons standards Mondocel® lors du retrait de la fosse nasale inférieure et du méat moyen (p=0.0001) ainsi qu'un taux de saignement plus faible (p=0.0001).

1-Melis A and al. Comparison of three different polyvinyl alcohol packs following functional endoscopic nasal surgery, Laryngoscope,125:1067-1071,2015. Étude randomisée, contrôlée en aveugle sur 90 patients nécessitant une chirurgie endoscopique fonctionnelle bilatérale du sinus répartis en 3 groupes. **Produits:** s-PVA = Tampon PVA standard Mondocel® Standard 10 cm; (Mondomed NV); oc-PVA= tampon PVA avec cellulose oxydée (Merocel® HemoX™ 10 cm; Medtronic Xomed Surgical Product); pf-PVA= tampon PVA avec film de polyéthylène (Merocel 2000® 8cm, Medtronic Xomed Surgical Products) **Objectif principal :** Comparer le saignement et l'inconfort du patient durant le retrait de 3 tampons PVA nasaux différents : s-PVA, oc-PVA, pf-PVA. **Critères d'évaluation principaux :** Évaluation de la douleur avec un score de 0 à 10 de l'EVA. Le saignement était évalué par le médecin (en aveugle) lors du retrait du tampon selon une échelle de 0 à 3 avec 0 signifiant "pas de saignement" et 3 "saignement sévère, nécessité de remettre un tampon". **Résultat objectif principal :** Durant le retrait bilatéral du tampon nasal inférieur, le score de douleur le plus bas a été reporté pour le Merocel® 2000. Le Standard Mondocel® a le score de douleur le plus élevé et le Merocel® HemoX™ un score intermédiaire (p=0,0001). La même différence statistique a été retrouvée durant le retrait bilatéral du second tampon assigné au méat moyen (p=0,0001). Le taux de saignement était significativement supérieur pour le Standard Mondocel® comparé au Merocel® 2000® et Merocel® HemoX™ qui a le ratio le plus faible (p=0,0001).

DISPONIBLE EN PLUSIEURS ÉPAISSEURS POUR DES APPLICATIONS SPÉCIFIQUES EN FONCTION DU SITE

Le tampon à pore ouvert est absorbant. Une fois hydraté, il se dilate pour éviter la formation d'oedème. Il applique une compression pour absorber le sang et les liquides.

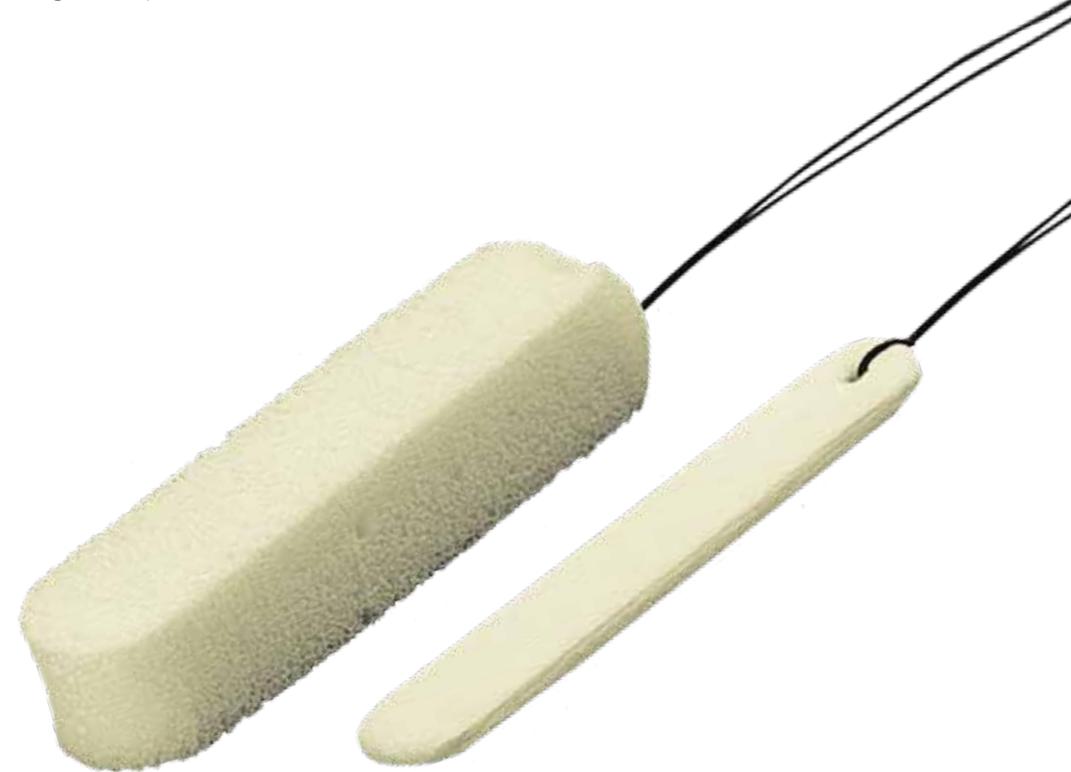

LA GAMME MEROCEL®

Merocel® se décline en 3 types d'éponge :

- Merocel® standard (400-),
- Merocel® 2000 (470-)
- hemoX™ (450-)

HEMOX™

PANSEMENT NASAL POST-OPÉRATOIRE STANDARD

- Destiné à une utilisation après une septoplastie, une rhinoplastie, une turbinectomie et d'autres interventions intra-nasales.
- Avec ou sans tube.

PRODUIT	DESCRIPTION	LONGUEUR	ÉPAISSEUR	HAUTEUR	QUANTITÉ
450400	hemoX, pansement nasal standard avec fil	4,5 cm	1,5 cm	2 cm	10
450409	hemoX, pansement nasal standard avec fil et tube	4,5 cm	1,5 cm	2 cm	10
450402	hemoX, pansement nasal standard avec fil	8 cm	1,5 cm	2 cm	10
450410	hemoX, pansement nasal standard avec fil et tube	8 cm	1,5 cm	2 cm	10

HEMOX™

PANSEMENT NASAL POST-OPÉRATOIRE ANATOMIQUE

- Pansement nasal anatomique conçu pour une utilisation après des interventions intra-nasales.
- Se dilate en s'humidifiant dans la cavité nasale pour favoriser le tamponnement et l'hémostase.
- Fin, 7,7 x 1,0 x 3,3 cm et standard 7,7 x 1,5 x 3,3 cm

PRODUIT	DESCRIPTION	LONGUEUR	ÉPAISSEUR	HAUTEUR	QUANTITÉ
450413	hemoX, pansement nasal fin de Doyle avec fil	7,7 cm	1 cm	3,3 cm	10
450424	hemoX, pansement nasal de Doyle avec fil	7,7 cm	1,5 cm	3,3 cm	10
450411	hemoX, pansement nasal de Doyle avec fil et tube respiratoire	7,7 cm	1,5 cm	3,3 cm	10



450400



450409



450402



450410



450413



450424



450411


HEMOX™ EPISTAXIS

LES PRODUITS MEROCEL® HEMOX™ EPISTAXIS SONT COMPOSÉS D'ÉPONGE MEROCEL® DE FAIBLE DENSITÉ À PORES LARGES ET DE CELLULOSE OXYDÉE. ILS PERMETTENT L'ABSORPTION DES LIQUIDES ET SONT CONÇUS POUR MINIMISER LA DOULEUR ET LES NOUVEAUX SAIGNEMENTS APRÈS RETRAIT.

Les produits Merocel Epistaxis sont conçus principalement pour une utilisation dans les services d'urgence.

CONSEILS POUR L'UTILISATION DES ÉPONGES EPISTAXIS

1

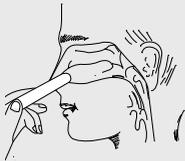


RECOUVRIR AVEC DES ANTIBIOTIQUES

Retirer le tampon nasal Pope de son emballage et recouvrir le rebord antérieur d'un lubrifiant antibiotique. Saisir une extrémité avec les doigts ou les pinces.

Version avec fil :
Saisir l'extrémité du fil.

2

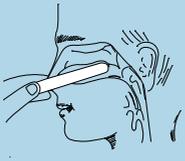

INSÉRER RAPIDEMENT

Insérer rapidement et délicatement le tampon le long du plancher de la cavité nasale jusqu'à ce qu'il atteigne la paroi nasopharyngée.

3




DÉBUT DE LA DILATATION

Si le tampon ne s'est pas totalement dilaté 30 secondes après la mise en place, l'hydrater avec 5 à 10 cc d'eau stérile, de sérum physiologique ou de gouttes antibiotiques.

Version avec fil :
Coller le fil sur le dos du nez et couper les extrémités tombantes.

RETRAIT

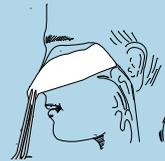

RETRAIT

Saturer d'eau stérile ou de sérum physiologique et attendre 10 minutes. Saisir avec une pince et retirer délicatement.

HEMOX™ ÉPONGES EPISTAXIS

- Conçu pour traiter une épistaxis antérieure et postérieure.
- La dilatation assure une pression afin de contrôler les saignements.
- Saignements antérieurs – 5,5 cm (Weimert), saignements postérieurs – 10 cm (Pope), Staxi-Stat pour épouser les contours de la cavité nasale.

PRODUIT	DESCRIPTION	LONGUEUR	ÉPAISSEUR	HAUTEUR	QUANTITÉ
450421	hemoX, tampon Weimert Epistaxis, avec fil	5,5 cm	1,5 cm	2,5 cm	10
450406	hemoX, tampon Pope Epistaxis, avec fil	10 cm	1,5 cm	2,5 cm	10
450416	hemoX, tampon Staxi-Stat Epistaxis, avec fil	—	—	—	10



450421



450406



450416

HEMOX™ TAMPONS SINUS

LA CELLULOSE OXYDÉE EST UTILISÉE DANS LA CONCEPTION DU PANSEMENT DANS LE BUT D'AMÉLIORER SA LUBRIFICATION POUR UN RETRAIT MOINS TRAUMATISANT POUR LES TISSUS.



BARON



KENNEDY



TOEFFEL

HEMOX™ TAMPONS SINUS

- À utiliser en cas de saignement postopératoire et de traumatisme.
- Trois épaisseurs pour s'adapter à diverses anatomies nasales.

PRODUIT	DESCRIPTION	LONGUEUR	ÉPAISSEUR	HAUTEUR	QUANTITÉ
450531	hemoX avec fil, Tampon Sinus Baron ultra-fin	2,5 cm	0,6 cm	2 cm	10 paires
450407	hemoX avec fil, Tampon Sinus Baron classique	2,5 cm	1,2 cm	2 cm	10 paires
450530	hemoX avec fil, Tampon Sinus Kennedy ultra-fine	3,5 cm	0,6 cm	1,2 cm	10 paires
450426	hemoX avec fil, Tampon Sinus Kennedy fin	3,5 cm	0,9 cm	1,2 cm	10 paires
450422	hemoX avec fil, Tampon Sinus Kennedy classique	3,5 cm	1,2 cm	1,2 cm	10 paires
450428	hemoX avec fil, Tampon Sinus Toeffel anatomique fin	4,5 cm	0,9 cm	2 cm	10 paires

HEMOX™

MÈCHES ET TAMPONS OTOLOGIQUES

- Les mèches sont conçues pour traiter les otites externes.
- Les tampons absorbent les liquides post-opérateurs.

INSERTION ET RETRAIT DES MÈCHES ET TAMPONS OTOLOGIQUES

1



Insérer dans le canal auditif en utilisant un spéculum et des forceps auditifs.

2



Instiller du lubrifiant antibiotique généreusement autour du tampon sans recouvrir l'extrémité proximale pour l'hydratation.

3



4



Imprégner d'une solution otique pour les mèches et d'eau stérile ou de solution saline pour les tampons, puis attendre dix minutes. Attraper avec les pinces et retirer doucement. Remarque : les tampons otologiques ne sont pas conseillés pour une utilisation après une intervention chirurgicale.

Pour les instructions d'utilisation complètes veuillez vous référer à l'emballage du produit.

HEMOX™

MÈCHE OTOLOGIQUE POPE

- Conçue pour traiter les otites externes et pour les interventions tympaniques.
- Se dilate pour remplir le canal auditif quand elle est hydratée avec une solution otique.

PRODUIT	DESCRIPTION	LONGUEUR	HAUTEUR	QUANTITÉ
450141	hemoX mèche otologique Pope	0,9 cm	1,5 cm	50
450146	hemoX mèche otologique Pope	0,9 cm	2,4 cm	10



MÈCHE OTOLOGIQUE

HEMOX™ TAMPON OTOLOGIQUE

- Les tampons sont composés d'éponge Merocel® de haute densité à base de cellulose oxydée. Ils permettent de garder le canal auditif ouvert tout en maintenant le greffon en place après une intervention chirurgicale de l'oreille moyenne.
- Conçu pour absorber les liquides post-opératoires.

PRODUIT	DESCRIPTION	DIAMÈTRE	LONGUEUR	QUANTITÉ
450356	hemoX tampon otologique Schindler avec fil	0,9 cm	1,3 cm	10
450355	hemoX tampon otologique Schindler avec fil	1,2 cm	1,5 cm	10



SCHINDLER

HEMOX™ TABLEAU RÉCAPITULATIF

Vous souhaitez passer de l'éponge Merocel® standard à une version hemoX™ ?

Le tableau ci-dessous vous aidera à trouver une éponge hemoX™ équivalente.

MEROCEL® STANDARD	DESCRIPTION	MEROCEL® HEMOX™
POST OP		
400400	Pansement nasal, 4,5 cm	450400
400409	Tampon nasal, 4,5 cm, avec tube respiratoire	450409
400402	Pansement nasal, 8 cm	450402
400410	Pansement nasal avec tube respiratoire, 8 cm	450410
400413	Pansement nasal de Doyle fin	450413
400424	Pansement nasal de Doyle	450424
400411	Pansement nasal de Doyle avec tube respiratoire	450411
EPISTAXIS		
400421	Tampon Epistaxis Weimert	450421
400406	Tampon Epistaxis Pope	450406
400416	Staxi-Stat® avec fil	450416
TAMPON SINUS		
400531	Baron ultra-fin	450531
400407	Tampon Sinus Baron	450407
400530	Kennedy ultra-fin	450530
400426	Kennedy fin	450426
400422	Tampon Sinus Kennedy	450422
400428	Toeffel fin	450428
MÈCHES OTOLOGIQUES		
400141	Mèches otologiques Pope, 15 mm	450141
400146	Mèches otologiques Pope, 24 mm	450146
TAMPONS OTOLOGIQUES		
400356	Tampons otologiques Schindler	450356
400355	Tampons otologiques Schindler	450355

La gamme Meroce[®] HemoX[™] composée de tampons nasaux, de tampons pour épistaxis, de mèches sinusales et de mèches et tampons otologiques sont de classe IIa, fabriqués par Medtronic Xomed Inc. CE n° 0123. Ils sont destinés à être utilisés en cas d'épistaxis, de saignement postopératoire et de traumatismes. Ils se dilatent lorsqu'ils s'humidifient pour favoriser le tamponnement et l'hémostase.

Lire attentivement la notice de ces produits avant toute utilisation.

Medtronic

Medtronic France S.A.S.

27 Quai Alphonse Le Gallo

CS 30001

92513 Boulogne-Billancourt Cedex

Tél. : 01 55 38 17 00

Fax : 01 55 38 18 00

RCS Nanterre 722 008 232

www.medtronic.fr

UC201709490FF © Medtronic France 2017.

Création avril 2017. Tous droits réservés

Crédit photo : Medtronic

Imprimé en France par RR Donnelley.